

Zfx

A COMPANY OF
ZIMMER BIOMET

Zfx™ Converter

El poder de descodificar en su propio laboratorio

ZFX™ CONVERTER

Zfx Converter es un módulo de software para la descodificación de la información tridimensional contenida en los pilares de cicatrización Encode. La interfaz del software es intuitiva y fácil de usar. Los datos descodificados se pueden exportar como archivos STL abiertos y después importarse en su software CAD. Las bibliotecas de restauración están incluidas en el software CAD Zfx y también están disponibles para Exocad, 3Shape y Dental Wings. Las bibliotecas, el módulo de software y la descodificación están a su disposición de forma gratuita.*

SISTEMA DE IMPRESIÓN ENCODE®

Un pilar de cicatrización "3 en 1" único que hace innecesario el uso de copias de impresión, cuerpos de escaneado y pilares de cicatrización; unos códigos únicos comunican la información del implante para facilitar el diseño CAD/CAM de la prótesis definitiva. El pilar de cicatrización Encode se puede escanear con un escáner IOS o bien tomarse una impresión tradicional.

VENTAJAS DE DESCARGAR

ZFX CONVERTER

- Descodificación autónoma
- Resultados inmediatos para el diseño de la prótesis definitiva
- Ampliación de su negocio al proporcionar servicios de descodificación y diseño a los odontólogos que prefieren utilizar Encode®

GRATIS
¡Módulo de software
y descodificación!*



exocad

3shape

dental wings



DESCARGA GRATUITA

Descargue de forma gratuita las bibliotecas de restauración de Zfx™ en www.zfx-dental.com


* El laboratorio puede descargar gratis Zfx Converter para descodificar sin coste alguno cuando se utiliza una restauración GenTek.



Suba al siguiente nivel de las impresiones digitales

GUÍA DE INSTALACIÓN

Instale Zfx Converter en pocos pasos y empiece a descodificar pilares de cicatrización Zfx Encode directamente.

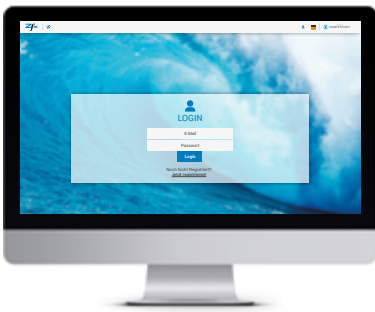

1

REGISTRARSE E INICIAR SESIÓN

Cree una nueva cuenta o inicie sesión en my.login.zfx-dental.com/Login



2

DESCARGAR E INSTALAR

Descargue Zfx Converter del Download Center e instale el software:

my.login.zfx-dental.com/Download/Converter

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en

my.login.zfx-dental.com/Help/Converter



3

EMPEZAR A DESCODIFICAR

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40 • 08940, Cornellà de Llobregat
Tel. +34 - 93 - 470 - 59 - 50 • Fax +34 - 93 - 372 - 11 - 25
www.zimmerbiometdental.com

Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, Alemania
Tel. +49 81 31 33 244 - 0 • Fax +49 81 31 33 244 - 10
www.zfx-dental.com