

Gebrauchsanweisung

Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter für Glaskeramik Halter

Version: 1/05.2020
 Erstellt am: 15.05.2020
 Datum des Inkrafttretens: 15.05.2020
 Datum des Inkrafttretens:
 Seite 1 von 2




Vorgesehene Verwendung

Der Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter für Glaskeramik Halter ermöglicht die Kompatibilität zwischen dem Klemmsystem eines Glaskeramikhalters und einem Zfx™ Pre-Abutment Blank.


Produktbeschreibung

Der Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter ist einzeln verpackt. Der Adapter wird vormontiert geliefert und besteht aus den folgenden Komponenten:

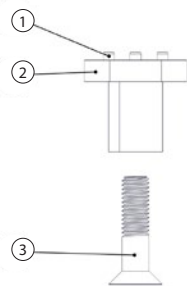


1. Orientierungsstifte
2. Adapter
3. Fixierungsschraube

Der Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter ermöglicht die Kompatibilität zwischen dem Klemmsystem eines Glaskeramik Block Halters und Zfx™ & Zfx™ GenTek™ Pre-Abutment Blanks mit vorgefertigten Anschlussgeometrien. Der Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter kann für alle Spannsysteme verwendet werden, die eine 10x10 mm Verbindung klemmen können (Abbildung 1).

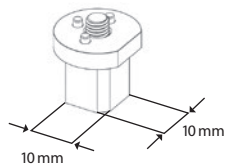


1a. 10 x 10 mm Klemmsystem für Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter

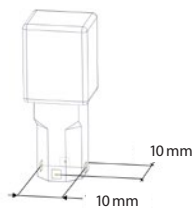


1b. Standard 10x10 mm Klemmsystem eines Glaskeramik Blocks

Installation

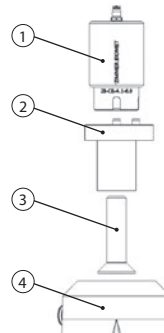


1. Pre-Abutment Blank
2. Adapter
3. Fixierungsschraube
4. Maschinen Halter

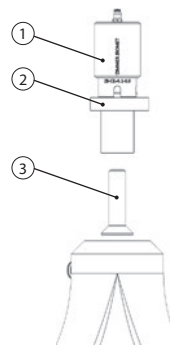

Schritt 1: Lösen Sie die Fixierungsschraube (3) aus dem Adapter (2)

Schritt 2: Der Pre-Abutment Blank (1) hat drei Kerben zur Orientierung. Richten Sie die Kerben auf dem Rohling an den drei Stiften auf dem Adapter aus (2).

Hinweis: Bevor Sie den Pre-Abutment Blank mit dem Adapter zusammensetzen, reinigen Sie den Adapter und den Fräsrohling mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, da Feuchtigkeit oder Schmutz auf dem Pre-Abutment Blank zu einem unerwünschten Fräsergebnis führen kann.

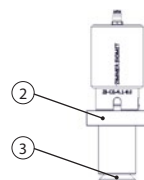

Schritt 3: Ziehen Sie die Fixierungsschraube (3) in den Gewindeteil des Pre-Abutment Blanks an. (2)



Schritt 4: Montieren Sie die Adapter-/Rohlingseinheit in das jeweils verwendete Spannsystem gemäß den Angaben des Herstellers.




Sehen Sie sich unser Installationsvideo online an
<https://youtu.be/lb8fTzZuWkw>

Gebrauchsanweisung

Zfx™ Pre-Abutment Blank Adapter für Glaskeramik Halter

Version: 1/05.2020
Erstellt am: 15.05.2020
Datum des Inkrafttretens: 15.05.2020
Datum des Inkrafttretens:
Seite 2 von 2

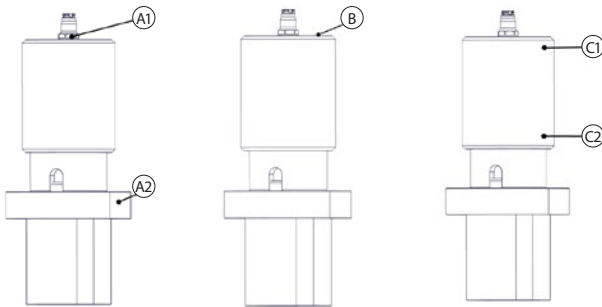

Koordinatensystem mit CAM ausrichten

Relevante Merkmale, die diese Ausrichtung ermöglichen:

- × **A** Die flache Oberfläche (A2) auf dem Adapter bestimmt die Sechskantausrichtung (A1)
- × **B** Oberseite (B) der Abutment-Rohlinge
- × **C** Äußerer Zylinder der Pre-Abutment Blanks
 - Position 1: Nahe der Oberseite (C1) (nahe der Verbindung)
 - Position 2: Nahe an der Bodenoberfläche (C2)

Wartung

Abseits der regelmäßigen Kalibrierung des Halters wenden Sie sich an den Hersteller der Fräsmaschine, um eine Wartungsanleitung für die Maschine zu erhalten.

Herstellerinformationen



Zfx GmbH
Kopernikusstraße 15
85221 Dachau
Deutschland

T +49 (0) 8131 / 33 244 - 0
F +49 (0) 8131 / 33 244 - 10
www.zfx-dental.com

